

PIA GbR

www.PIA-shop.de
kontakt@PIA-shop.de

Datenblatt

Bowie & Dick Test

ISO 11140-4

100 Indikatoren

innerhalb der
Verpackung

Stand: 01-2026

Einsetzbar in jedem validierten Prozeß aufgrund der Herstellung nach DIN

Beschreibung des Produktes	Der Bowie & Dick Test simuliert ein 7kg Wäschepaket
Anwendung des Produktes	Der Bowie & Dick Test sollte in einem separaten Programm des Autoklaven durchgeführt werden. Er ist auf dem untersten Tray zu platzieren. Die Testdurchführung erfolgt bei 134°C mit einer Haltezeit von 3,5 Minuten, oder bei 121°C mit einer Haltezeit von 15 Minuten. Der Indikatorbogen in der Mitte des Paketes muß einheitlich und komplett umschlagen. Sollte das nicht der Fall sein, ist dieses zu dokumentieren. Im Wiederholungsfall ist der Autoklav bis nach der Prüfung durch einen qualifizierten Techniker stillzulegen. Das rückseitige Etikett des Bowie & Dick Testes ist mit einem Indikator versehen, welcher von rosa nach schwarz umschlägt. Somit wird Doppelgebrauch vermieden. Dokumentieren Sie alle Ergebnisse.
Lagerung des Produktes	Weder Licht noch Hitze aussetzen. Bei +10°C bis +40°C sowie relativer Feuchtigkeit von 30% bis 60% aufbewahren.
Technische Daten des Produktes	Bowie & Dick Testpaket nach ISO 11140-4, gebrauchsfertig Material: Pappe mit Spezialbeschichtung, Spezialpapier Komplette und gleichmäßige Verfärbung nach schwarz notwendig
Verpackung des Produktes	Pappschachtel mit 1 Indikator, gebrauchsfertig Beschriftung: LOT + Verfall